

# Detro<sup>®</sup> San AF

**Gotowy do użycia, bezalkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych**

## **OBSZARY ZASTOSOWANIA:**

Detro<sup>®</sup> San AF przeznaczony jest do szybkiej dezynfekcji oraz mycia powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych, w tym inkubatorów, stetoskopów, kozetek, sprzętu rehabilitacyjnego, łóżek i innych mebli medycznych. Możliwość stosowania na oddziałach dziecięcych i noworodkowych oraz w obecności pacjentów. Detro<sup>®</sup> San AF jest kompatybilny ze szkłem, plexą, akrylem, powierzchniami drewnianymi, silikonem, materiałami ze stali nierdzewnej, ceramiką, a także z powierzchniami wrażliwymi na działanie związków utleniających.

## **CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:**

- Produkt gotowy do użycia
- Bez zawartości aldehydu, fenolu i alkoholu, na bazie mieszaniny czwartorzędowych związków amoniowych
- Skuteczność w warunkach brudnych
- Szerokie spektrum skuteczności mikrobiologicznej
- Ekonomiczne zużycie dzięki rozpylaczowi, który może dozować produkt w formie piany
- Skuteczny wobec szczepów MDRO
- Kompatybilny z systemem suchych chust, zapewniającym komfort codziennej pracy i najwyższy standard higieniczny

## **SKŁAD:**

Bis 3-aminopropylododecyloamina, chlorek didecylodimetyloamoniowy, chlorek benzalkoniowy, substancje pomocnicze.

## **SKUTECZNOŚĆ MIKROBIOLOGICZNA:**

Bakterie, grzyby, prątki, wirusy, spory do 1 minuty.

<b>DZIAŁANIE</b>	<b>NORMA</b>	<b>CZAS</b>
<b>Bakterie (w tym MDRO: MRSA, VRE, A. baumannii)</b>	<b>EN 13727</b>	<b>1 minuta</b>
<b>Bakterie, grzyby (C. albicans)</b>	<b>EN 16615</b>	<b>1 minuta</b>
<b>Grzyby (C.albicans, A. niger)</b>	<b>EN 13624</b>	<b>1 minuta</b>
<b>Prątki (M. avium, M.terrae)</b>	<b>EN 14348</b>	<b>1 minuta</b>
<b>Wirusy (Polio, Adeno, Noro)</b>	<b>EN 14476</b>	<b>1 minuta</b>
<b>Spory (B. subtilis)</b>	<b>EN 13704</b>	<b>1 minuta</b>

## **SPOSÓB UŻYCIA:**

W celu zdezynfekowania powierzchni należy nanieść preparat Detro<sup>®</sup> San AF na powierzchnię bezpośrednio lub za pomocą czystej ściereczki / ręcznika papierowego. Pozostawić do wyschnięcia w celu zapewnienia efektu bójczego. Wydajność preparatu 50ml/m<sup>2</sup>. Produkt gotowy do użycia, nie rozcieńczać.

## **OKRES WAŻNOŚCI:**

Termin ważności preparatu wynosi 24 miesiące od daty produkcji.